



ALLMOBILITY BAGNOLETTO



BAGNOLETTO je inovatívny systém, ktorý **poskytuje potešenie zo skutočného kúpeľa**. Zabezpečuje väčšiu úľavu, fyzickú aj psychickú, pričom cieľom je včasné a presné čistenie.

Ak sa staráte o osobu pripútanú na lôžko, určite poznáte dôležitosť fyzickej a psychickej pohody a podpory normálnych biologických funkcií a každodennej starostlivosti o telo. Aj keď pacient nie je sebestačný, **je nevyhnutné snažiť sa udržiavať jeho hygienické návyky nezmenené**, podporovať očistu a hydratáciu.



- ➖ V súčasnosti sa často vykonáva hygiena umývaním tela špongiami (namočenými vo vode alebo neutrálnych roztokoch saponátu) a dôkladným osušením pokožky. Táto metóda má však veľa obmedzení: špongie často spôsobujú podráždenie v dôsledku nadmerného trenia (v týchto prípadoch je pokožka obzvlášť citlivá). Okrem toho nie vždy zaručujú úplné vyčistenie, najmä v oblastiach, ktoré sú obzvlášť ťažko dostupné (rany a záhyby tela), a ak nie sú riadne sterilizované, môžu byť nosičmi infekcií (vírusy a baktérie).
- ➖ Ďalšou možnosťou, ak to podmienky dovoľujú, môže byť kúpeľ a sprcha s asistenciou. Kompletný kúpeľ zahŕňa použitie sedačky alebo elektrického zdviháka, ktorý musí byť nainštalovaný na vani, a sprcha zahŕňa nástennú sedačku alebo invalidný vozík. Obe metódy sú pomerne náročné na zvládnutie, vyžadujú si viac ako jedného asistenta a môžu mať za následok fyzické poranenia alebo silný stres pre pacienta.

➕ Podložka Allmobility Bagnoletto bola navrhnutá s cieľom prekonať tieto problémy . Je to najlepšia alternatíva k tradičným pomôckam ; je pohodlná , praktická , rýchla a zaisťuje presné čistenie , čím znižuje stres asistenta a nepohodlie pre pacienta.

- ✔ Môže byť použitá priamo na lôžku pacienta, čím sa zabráni akejkoľvek nesprávnej manipulácii s pacientom
- ✔ Poskytuje všetky výhody kompletného kúpeľa
- ✔ Zlepšuje kvalitu ošetrovateľských a hygienických úkonov
- ✔ Umožňuje použitie tečúcej vody v akýchkoľvek podmienkach alebo kontexte
- ✔ Nepotrebuje elektrinu
- ✔ Vhodná pre akýkoľvek typ postele (aj bez bočnice)
- ✔ Rýchle a jednoduché použitie



BAGNOLETTO je PVC fólia s vystuženými bočnými okrajmi, ktoré sú zdvihnuté a spojené dohromady , aby vytvorili kontajner . Polohuje sa viac-menej rovnako ako pri výmene plachty s pacientom na lôžku. Obsluhu uľahčujú uchopovacie popruhy.



Predížte BAGNOLETTO
Umiestnite osobu pomaly na jednu stranu







Montáž
BAGNOLETTO položte čiastočne pod osobu. Otočte osobu a úplne rozviňte BAGNOLETTO



Kúpanie
Použite tlakovú pumpu a ručnú sprchu. Doprajte si potešenie z kompletného kúpeľa



Demontáž
Vypustite prebytočnú vodu. Odstráňte jednorazový obal a rozložte BAGNOLETTO

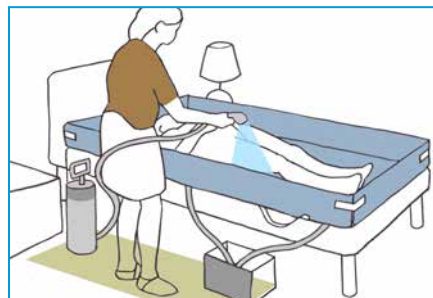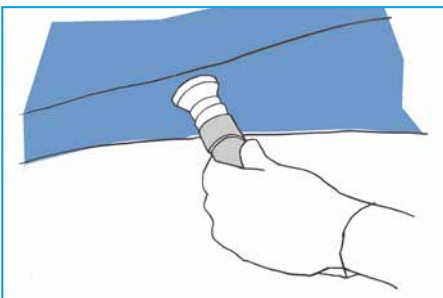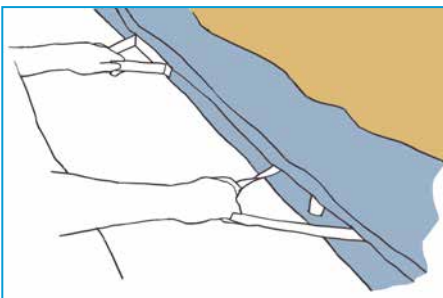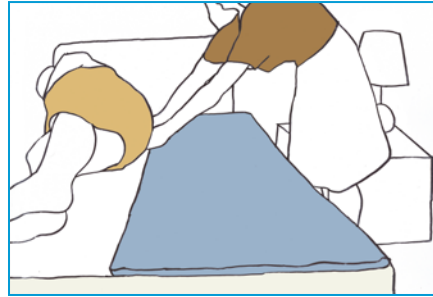

Systém má niekoľko miest na odtok vody a rovné alebo zakrivené vlnité hadice, ktoré uľahčujú túto operáciu.

Vodu je možné priviesť z vodovodného kohútika s predĺžením alebo použiť ručnú tlakovú nádobu (príslušenstvo).

Pre profesionálne použitie v rezidenčných alebo rehabilitačných zariadeniach sa odporúča použiť jednorazové plachty, ktoré možno použiť na každé jedno pranie.

 Pozrite si video na Youtube >



KÓD PRODUKTU	POPIS
VQ BLBAGNOLE	BAGNOLETTO podložka 85x190x20 cm
VQ BLSERBAT	Manuálna tlaková nádoba pre BAGNOLETTO
VQ BLTELINI	Jednorazové obliečky na BAGNOLETTO 10 ks a 4 raznice
VQ BLSOLOTALI	Jednorazové obliečky na BAGNOLETTO 10 ks



• **Ako používať BAGNOLETTO?**

Natiahnite Bagnoletto pod pacienta a použite nádrž na pumpu (ktorá obsahuje čistú teplú vodu) na sprchovanie osoby.

• **Dá sa použiť s akýmkoľvek typom postele?**

Áno, BAGNOLETTO je vhodné pre akýkoľvek typ postele (aj bez bočnic).

• **Áké sú rozmery BAGNOLETTO?**

85 x 190 x 20h cm

• **Áké materiály sú použité pri výrobe Bagnoletto?**

BAGNOLETTO je vyrobené z polyesterovej tkaniny a PVC smaltu triedy 2C.



• **Ako vypustím odpadovú vodu?**

Po kúpeli je špinavá voda odvádzaná do špeciálnych nádob cez dodané potrubie.

• **Ako uchovávať BAGNOLETTO?**

Po každom použití sa musí BAGNOLETTO dôkladne vysušiť a dezinfikovať roztokom na báze etanolu (odporúčaný produkt: sprej Melsept).

• **Koľko vody obsahuje nádrž?**

Nádrž čerpadla obsahuje 10 litrov.

• **Je možné pridávať tabletky do vody?**

Áno, je možné pridať prísady a lekárske rozpúšťadlá.

• **Je potrebné pacienta premiestniť?**

Nie, BAGNOLETTO je možné použiť priamo na posteli osoby a umožňuje vám vyhnúť sa akémukoľvek nerozvážnemu pohybu.

• **Koľko asistentov je potrebných na používanie BAGNOLETTO?**

Jeden asistent stačí. Sekvencia je krátka a ľahko sledovateľná, ako ukazuje nahrané video.

• **Je možné používať BAGNOLETTO bez elektriny?**

Áno, BAGNOLETTO je možné používať v prostrediach bez elektriny.

• **Je potrebné pomôcku po použití dezinfikovať?**

Jednorazové plachty eliminujú potrebu ďalšej dezinfekcie, najmä v zdravotníckych zariadeniach.

